


PFLEGEANLEITUNG

von OP-Hauben & Mund-Nasen-Masken

medical instinct®
... WE ARE IMPLANTOLOGY!

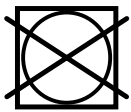

- + 100 % Baumwolle
- + Waschbar bei 60°
- + Bitte Feinwaschmittel ohne Bleiche verwenden!
- + Schonschleudern
- + nicht Trocknergeeignet
- + Die OP-Hauben und Mund-Nasen-Masken können bis 134° sterilisiert werden.

Waschmittel

Bitte seien Sie vorsichtig mit Kompakt-, Universal- oder Vollwaschmittel. Diese enthalten in vielen Fällen Bleichstoffe oder optische Aufheller. Diese machen helle und weiße Wäsche aus reiner Baumwolle zwar leuchtend sauber, können dafür aber farbigen Textilien schaden. Verwenden Sie deshalb bitte ausschließlich Colorwaschmittel für farbige Textilien. Wir empfehlen zudem die Verwendung von Flüssigwaschmittel. Bei der Dosierung folgen Sie bitte der Herstellerempfehlung. Diese gibt die passende Waschmittelmenge für den unterschiedlichen Verschmutzungsgrad in Abhängigkeit vom Härtegrad Ihres Leitungswassers an.

BITTE BEACHTEN

OP-Hauben aus Baumwoll-Mischgewebe sowie OP-Hauben mit Schweißband sind nicht sterilisierbar.